

# Produkt- NEUIGKEITEN

## STERIKING®

### Steriking® Multi Seal Test Kit

Verringert Ihren Testaufwand und kontrolliert die Zuverlässigkeit des Siegelgerätes sowie die Siegelnahtdichtigkeit.



Gemäß ISO 11607-1:2006, Anhang B = Dichtigkeitsprüfung ASTM F1929:98 (2004) und ISO 11607-2:2006.

Für Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens zur Dichtigkeitsprüfung von Versiegelungen, die mit einem Rotosealer hergestellt wurden.



Das „Multi-Seal-Test-Kit“ verbindet zwei Prüfungen in einem Test-Set.

- **TÄGLICH:** Optische Prüfung der Siegelqualität mit Hilfe der Siegelkontrollbögen SC250. Sichert den Siegelzustand ab und zeigt ggf. vorliegende Siegelprobleme.
- **WÖCHENTLICH:** Prüfung mit Hilfe der gefärbten Testflüssigkeit. Überprüft die Dichtigkeit der Siegelnähte.

**Schnell. Einfach. Zuverlässig.**

Das Test Kit beinhaltet eine ausreichende Menge an Prüfmitteln, damit Sie die Qualität Ihres Siegelgerätes etwa ein Jahr lang prüfen können:

- 1 SC250 Siegelkontrollbögen
- 2 Flasche mit 80 ml farbiger Prüflösung (Falcon)
- 3 Stoppuhr
- 4 Registrierkarte für Archivierungszwecke
- 5 Benutzungsanweisungen



### Hinweise für die wöchentliche Prüfung

- 1 Einmal pro Woche für jedes Siegelgerät durchführen
- 2 Siegeln Sie den SC-250 Bogen mit dem zu prüfenden Siegelgerät.
- 3 Öffnen Sie die Flasche mit der Testflüssigkeit und lassen Sie 1,0–1,5 ccm (30–40 Tropfen) der gefärbten Prüflösung auf die Quernaht des Testbogens SC250 fallen und sorgen Sie dafür, dass die Flüssigkeit die gesamte Länge der Siegelnaht bedeckt.
- 4 Lassen Sie die Testflüssigkeit für 5 Sekunden über die gesamte Länge Kontakt zur Siegelnaht haben. Benutzen Sie zur Zeitmessung die mitgelieferte Stoppuhr.
- 5 Prüfen Sie optisch unmittelbar nach Ablauf der 5 Sekunden, ob im Bereich der Heißsiegelnaht undichte Stellen oder Kanäle aufgetreten sind. An den Siegelnähten darf es keine solchen Stellen geben.
- 6 Dokumentieren Sie das Testergebnis auf dem mitgelieferten Prüfberichtsbogen und zeichnen Sie es ab.

*We care that you pack safely!*

**WIPAK**

Ihr Partner: Michael Ludwig • Steriking Sterilisationsbedarf • Athener Weg 21 • 30982 Pattensen  
Telefon: 0 51 01 / 8 19 55 06 • Fax: 0 51 01 / 8 19 55 07 • Email: [steriking@steri-pack.de](mailto:steriking@steri-pack.de)