


# STERIKING® – The King of Quality




STOPP! BEIM EINSATZ IMMER  
ERST AUF SICHERHEIT ACHTEN


Vor dem Öffnen eines  
Sterilbarrieresystems sollten Sie:

- 1. Die Unversehrtheit der Verpackung prüfen**
  - Keine Löcher oder Risse
  - Unbeschädigte Versiegelung
- 2. Prüfen, ob der Prozessindikator die entsprechende Farbe angenommen hat**
  - 2P – Beutel und Rollenware
  - 3P – Beutel und Rollenware
- 3. Darauf achten, dass die Verpackung gemäß des Aufreiß-Symbols  von der richtigen Seite her geöffnet wird**
- 4. Sich die grundsätzlichen Richtlinien zum korrekten Öffnen vergegenwärtigen**
  - Faserfreies Öffnen durch Öffnen der oberen Ecken
  - Öffnungslaschen festhalten und Folie gleichmäßig vom Papier abziehen
  - Packung maximal 2/3 öffnen, um so das Sterilgut keimfrei entnehmen zu können
  - Sterilgut soll nicht mit der nicht keimfreien Außenseite der Verpackung in Kontakt kommen

## STERIKING - 2P

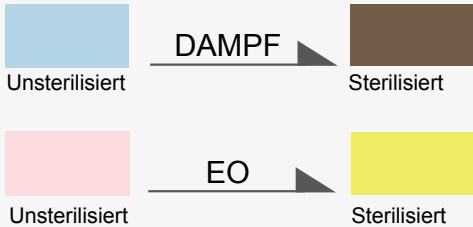

## STERIKING - 3P

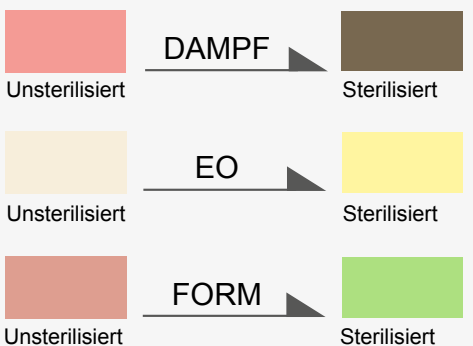

We care that you pack safely!

**WIPAK**